

# Reoxcare

MAXIMIZING THE NATURAL WOUND HEALING PROCESS

## REOXCARE APÓSITO

Un nuevo enfoque para  
el tratamiento de las heridas



histocell  
REGENERATIVE MEDICINE


cardiva  
El latido del progreso®

# Reoxcare Apósito

## ¿Qué es Reoxcare Apósito?

Reoxcare Apósito es un tratamiento innovador de última generación con propiedades antioxidantes únicas, que promueve el proceso natural de cicatrización de las heridas.


Su novedoso y patentado diseño es el resultado de años de investigación de HistoCell en medicina regenerativa.

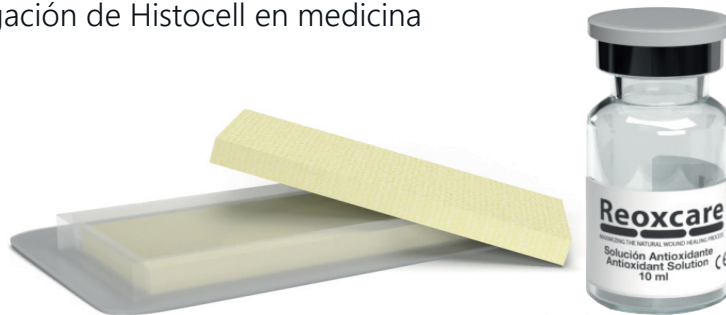

## ¿Cómo funciona Reoxcare Apósito?


Reoxcare Apósito combina 2 componentes de origen natural para un óptimo cuidado de la piel.

### Matriz 100% de origen vegetal con gran capacidad de absorción

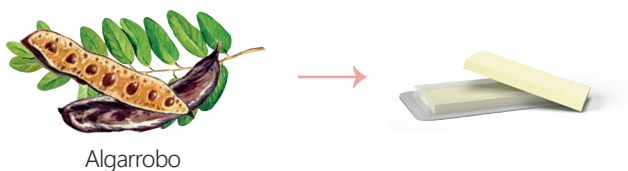

Algarrobo

### Solución de hidratación con propiedades antioxidantes

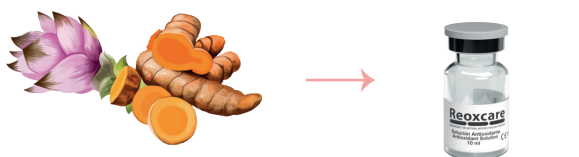


Cúrcuma +  
acetilcisteína



#### LBG (galactomanano)

Obtenido de la molienda de las semillas del algarrobo. Referente en la medicina tradicional por sus propiedades antioxidantes y muy calmantes.

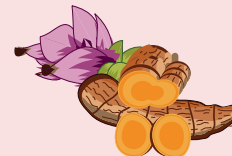

#### Cúrcuma


Fuente de vitaminas y minerales. Previene la oxidación de los tejidos y proporciona una defensa frente al ambiente inflamatorio.

## Ventajas


- Reoxcare Apósito es un tratamiento eficaz tanto en heridas agudas como crónicas.
- Evita la cronificación de las heridas.
- Activa la herida, obteniendo un lecho óptimo que permite el proceso natural de cicatrización.
- Tiene una excelente capacidad de desbridamiento, tanto osmótico como autolítico.
- Evita la interacción del biofilm en el proceso de cicatrización.

# La ciencia detrás del producto


## Acción antioxidante

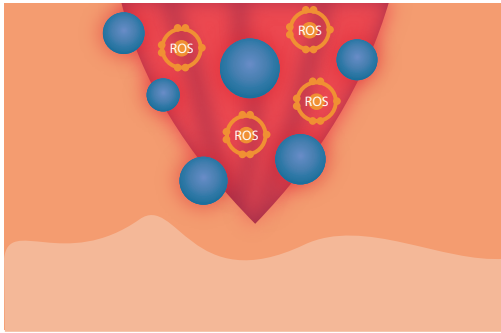

Las células inflamatorias producen radicales libres.

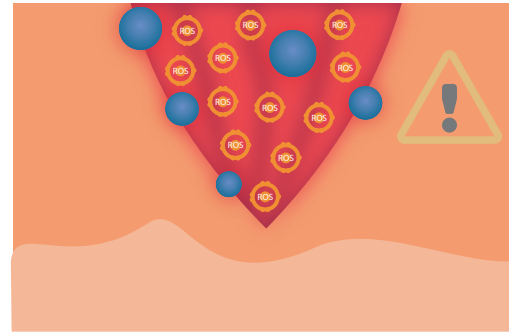

Cuando hay un exceso de radicales libres la cicatrización se detiene.

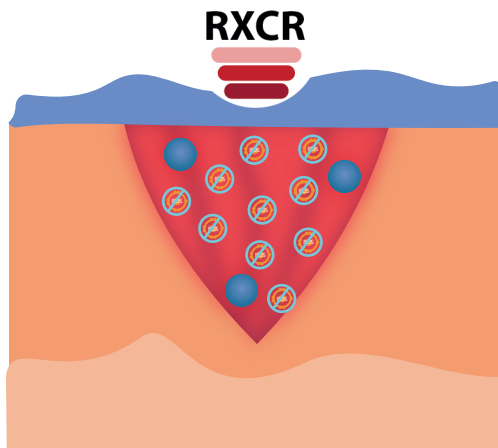

Reoxcare neutraliza el exceso de radicales libres manteniendo un ambiente húmedo.



Y permite que los tejidos progresen hacia la cicatrización.

## Propiedades de Reoxcare Apósito

### Antioxidante

Neutraliza el exceso de radicales libres en el entorno, contribuye en el avance del proceso de cicatrización.

### Desbridamiento

Facilita la eliminación de tejidos no viables presentes en el lecho de la herida.

### Activación de la herida

Preparación del lecho, inducción del tejido de granulación y activación de los bordes.

### Alivio del dolor

Las propiedades hidratantes y antioxidantes actúan combinadas para disminuir el dolor en la herida y su entorno.

### Funcionamiento

Fácil de aplicar y retirar.

### Biofilm

Evita que el biofilm interfiera en la evolución de la herida.

# ¿Cómo utilizar Reoxcare Apósito?






## ¿Cómo se usa Reoxcare Apósito?

 <p>1</p>	<p>HIDRATAR LA MATRIZ CON LA SOLUCIÓN Y ESPERAR 1-2 MINUTOS</p>	 <p>2</p>	<p>LIMPIAR LA HERIDA Y PROTEGER LA PIEL PERILESIONAL CON PELÍCULA BARRERA A CRITERIO DEL FACULTATIVO</p>
 <p>3 +</p>	<p>RECORTAR LA MATRIZ PARA ADAPTARLA A LA FORMA DEL LECHO Y COLOCARLA EN CONTACTO DIRECTO CON LA HERIDA</p>	 <p>4 +</p>	<p>CUBRIR CON UN APÓSITO SECUNDARIO DE CURA EN AMBIENTE HÚMEDO APROPIADO. CAMBIAR 2 VECES POR SEMANA (CADA 3-4 DÍAS)</p>

Reoxcare Apósito es un producto de un solo uso. No utilizar si el envase está abierto o dañado. No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.

## ¿Qué apósito secundario utilizar con Reoxcare?


Reoxcare es compatible con los apósitos secundarios comúnmente utilizados. Se seleccionará el más apropiado según el nivel de exudación de la herida.

Nivel exudado	Apósito secundario
	<p>Alginato Fibra de polivinilo Hidrofibra de hidrocoloide Apósito hidroactivo superabsorbente</p> <p> En heridas muy exudativas utilizar un segundo apósito secundario tipo espuma con silicona adhesiva.</p>
	<p>Espuma de poliuretano con silicona adhesiva Hidrofibra de hidrocoloide con silicona</p>
	<p>Film de poliuretano</p> <p> En heridas muy poco exudativas, para mantener la humedad y evitar que se seque, Reoxcare se puede cubrir con hidrogel amorfo o conformado.</p>

# ¿Cuándo utilizar Reoxcare Apósito?

Reoxcare Apósito puede utilizarse en úlceras de diferente etiología como las de pie diabético, por presión, hipertensivas, venosas con tratamiento de compresión, de componente isquémico y por calcifilaxis.

También puede utilizarse en dehiscencias quirúrgicas, quemaduras y heridas traumáticas.

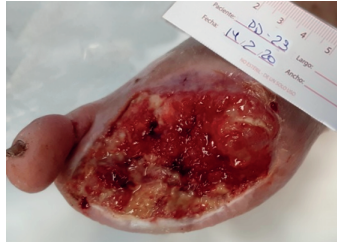

Especialmente indicado en presencia de hueso o tendón expuesto

Induce la formación de tejido de granulación sobre tejido expuesto

Se puede utilizar en presencia de tejido desvitalizado, contribuyendo a su eliminación

## Casos clínicos



### Úlcera de pie diabético

Paciente varón de 58 años con diabetes tipo II. Herida quirúrgica tras amputación transmetatarsiana.



Inicio



Semana 8



Semana 13

1 mes de antigüedad

#### Tratamiento previo

Terapia de presión negativa durante 1 mes tras la cirugía.

#### Tratamiento con Reoxcare Apósito

Aplicación de Reoxcare Apósito en el lecho de la herida + apósito de hidrofibra de hidrocoloide con silicona. Curas dos veces por semana al inicio y luego paso a una semanal hasta el cierre.



### Úlcera venosa

Paciente varón de 62 años con antecedentes de insuficiencia venosa.



Inicio



Semana 3



Semana 6

5 meses de antigüedad

#### Tratamiento previo

Diversos tratamientos de CAH, antibioterapia oral por cultivos positivos y terapia compresiva.

#### Tratamiento con Reoxcare Apósito

Aplicación de Reoxcare Apósito en el lecho de la herida, apósito de espuma no adhesivo y terapia compresiva. Curas cada 4 días.

Tras un mes, por avance significativo de la cicatrización, se cambia a apósito de espuma y terapia compresiva hasta el cierre.



### Herida hipertensiva

Mujer de 84 años con diabetes tipo II, insulino-dependiente, HTA e insuficiencia venosa.



Inicio



Semana 8



Semana 13

18 meses de antigüedad

#### Tratamiento previo


Múltiples productos.

No tolera el vendaje porque refiere dolor.

#### Tratamiento con Reoxcare Apósito

Aplicación de Reoxcare Apósito en el lecho de la herida y apósito de espuma como secundario. Curas cada 48-72 horas por alto nivel de exudado.

¡Conoce más de Reoxcare en nuestra página web!

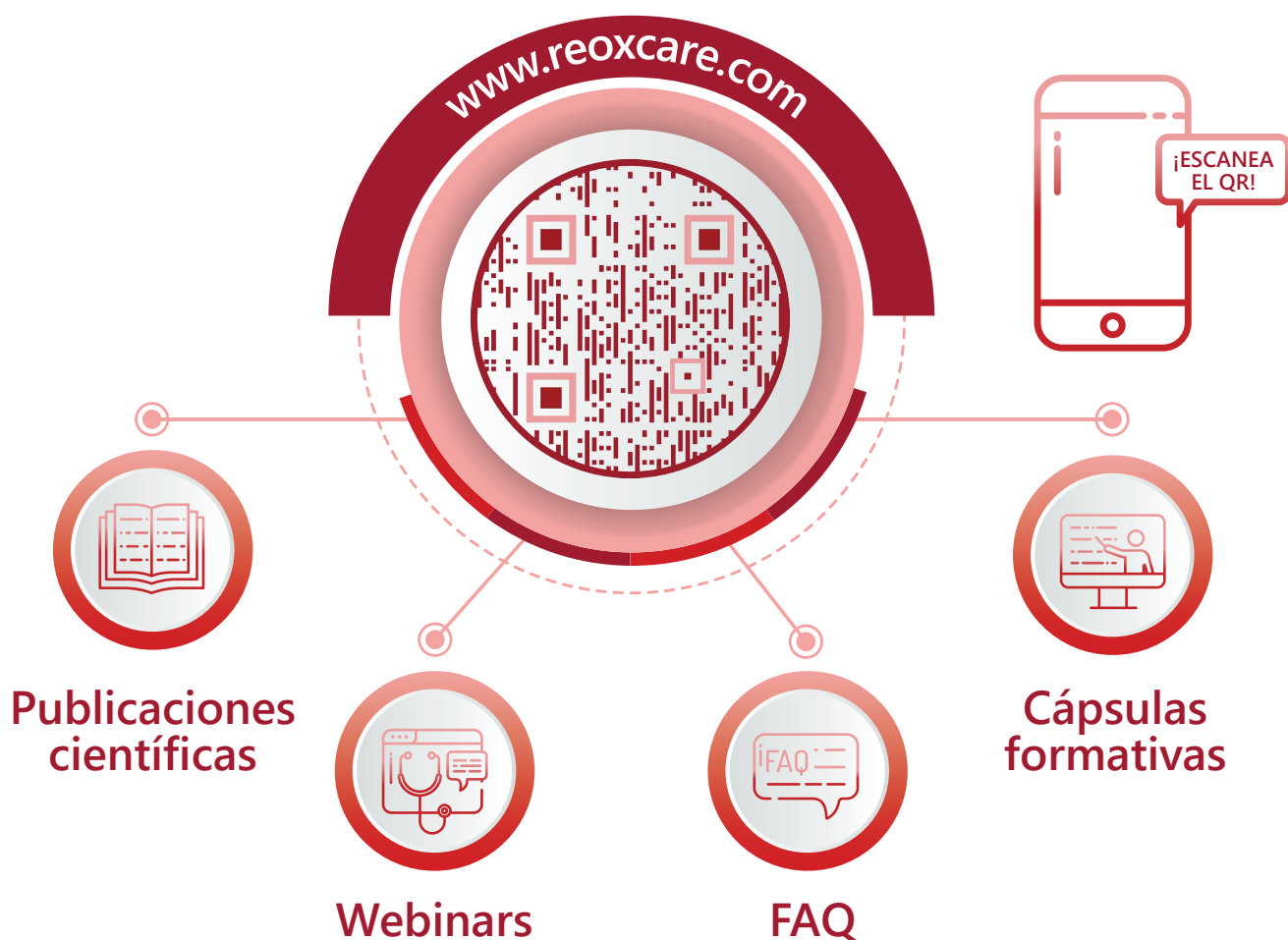

Fabricado por: **histocell**  
REGENERATIVE MEDICINE  
Histocell, S.L.  
Parque Tecnológico 801, 2º  
48160 Derio (Bizkaia) España  
T. +34 94 656 7900 | reoxcare@histocell.com  
www.histocell.com

Distribuido por: **cardiva**  
CARDIVA 2, S.L.  
C/ Anabel Segura, 11, Edif. A – Planta 1ª  
28108 Alcobendas (Madrid) España  
T. +34 91 358 6110  
www.cardiva.com